

Inicio rápido: Sistema de DPCA stay•safe®

Instrucciones

Utilice la siguiente lista de verificación para asegurarse de que se siguen los pasos adecuados. Se debe usar una técnica aséptica durante todo este procedimiento. Marque la casilla para indicar que se ha realizado cada paso.

✓	PASOS
	Prepare el área de trabajo.
	Recolecte los suministros.
	Caliente la bolsa de solución.
	Coloque el organizador sobre una superficie de trabajo limpia o sobre el sostén del soporte IV.
	Exponga el conjunto de extensión del catéter y asegúrese de que la pinza blanca esté cerrada.
	Póngase la mascarilla y, a continuación, lávese las manos.
	Abra el envoltorio externo de la bolsa de solución.
	Compruebe que la bolsa de solución cumpla con el principio S.C.A.L.E.
	Localice el DISC de stay•safe.
	Gire el disco azul en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que encaje en el recortable.
	Retire la cubierta de plástico.
	Coloque el DISC en el organizador.
	Presione los tubos en los canales.
	Cuelgue la bolsa de solución.
	Coloque la bolsa de drenaje en el suelo.
	Rompa el cono.
	Retire la tapa de stay•safe del paquete e introdúzcalo en la ranura "Nueva tapa".
	Coloque el extremo del conjunto de extensión del catéter en la ranura "Extensión".
	Lávese las manos.
	Desenrosque la tapa del conector del DISC de stay•safe.
	Desenrosque el conjunto de extensión del catéter de la tapa de stay•safe y conéctelo inmediatamente al DISC.

✓	PASOS
	Coloque la tapa retirada del conector del DISC de stay•safe sobre la tapa usada y deséchela.
	Abra la pinza del conjunto de extensión del catéter.
	El drenaje tardará unos 20 o 30 minutos.
	Gire el disco azul en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición 2: Enjuague.
	Después de unos segundos, gire el disco hasta la posición 3: Infusión.
	La infusión tardará unos 10 o 15 minutos.
	Gire el disco azul en el sentido de las agujas del reloj hasta el final de la posición 4: PIN/Cierre.
	Cierre la pinza del conjunto de extensión del catéter.
	Lávese las manos si se le indica que lo haga.
	Desenrosque la cubierta protectora de la nueva tapa de stay•safe.
	Desenrosque el conjunto de extensión del DISC.
	Conecte inmediatamente el conjunto de extensión del catéter con PIN a la nueva tapa de stay•safe.
	Retire el conjunto de extensión con tapa del organizador.
	Asegúrese el conjunto de extensión del catéter en el abdomen.
	Eliminación del conjunto de doble bolsa DPCA:
	Conecte la cubierta protectora retirada de la tapa stay•safe usada al extremo abierto del DISC.
	Revise y pese el dializado drenado.
	Retire todo el sistema stay•safe del soporte IV y del organizador.
	Deseche la solución.

Lea las Instrucciones de uso para el uso seguro y adecuado de este dispositivo. Para obtener una descripción completa de los peligros, las contraindicaciones, los efectos secundarios y las precauciones, consulte la etiqueta completa en el paquete, en www.fmcna.com.

Indicaciones de uso

El uso de conjuntos administrativos desechables stay•safe para DPCA con conector stay•safe está indicado para tratar la insuficiencia renal aguda y crónica terminal. Las soluciones de diálisis peritoneal DELFLEX® están indicadas para el tratamiento de pacientes con insuficiencia renal crónica que reciben diálisis peritoneal cuando se considera que el tratamiento médico sin diálisis es inadecuado.

Precaución

La ley federal (EE. UU.) restringe la venta de este dispositivo por orden médica.

© 2021 Fresenius Medical Care. Todos los derechos reservados. Fresenius Medical Care y el logotipo del triángulo, Fresenius Renal Technologies, DELFLEX y stay•safe son marcas comerciales de Fresenius Medical Care Holdings, Inc. o sus compañías afiliadas. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. P/N 104448-01S Rev A 7/2021



**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

RENAL THERAPIES GROUP